


icumedical
human connections

deltec®

Gripper Plus®
Gripper Plus® POWER P.A.C.
Agulha de Huber com Segurança

Soluções em Segurança

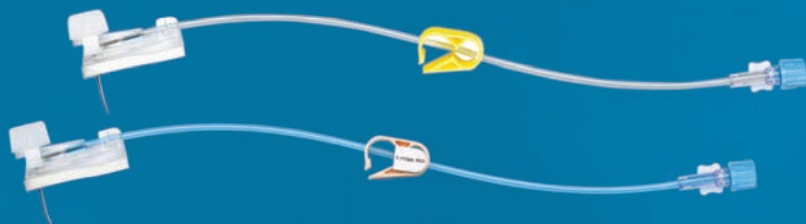

Gripper Plus® POWER P.A.C

Agulha de segurança sem núcleo para injeção de potência.

Indicada para a injeção de potência de meio de contraste.

- Mais segurança para um procedimento de alta pressão;
- Tubo azul que diferencia das agulhas não power;
- Taxa de infusão recomendada 5ml/s;
- Pressão máxima de 300 psi.



Agulhas GRIPPER PLUS® POWER P.A.C.

Código	Descritivo	Quantidade por Caixa
21-3362-24	Agulha Gripper Plus® POWER P.A.C. 20G x 25 mm	12
21-3363-24	Agulha Gripper Plus® POWER P.A.C. 20G x 32 mm	12
21-3364-24	Agulha Gripper Plus® POWER P.A.C. 19G x 25 mm	12
21-3365-24	Agulha Gripper Plus® POWER P.A.C. 19G x 32 mm	12
21-3367-24	Agulha Gripper Plus® POWER P.A.C. 20G x 19 mm	12
21-3368-24	Agulha Gripper Plus® POWER P.A.C. 19G x 19 mm	12
21-3369-24	Agulha Gripper Plus® POWER P.A.C. 20G x 16 mm	12

Agulhas GRIPPER PLUS®

Código	Descritivo	Quantidade por Caixa
*21-2770-24	Agulha Gripper Plus® 22G x 16mm	12
21-2766-24	Agulha Gripper Plus® 22G x 19mm	12
21-2760-24	Agulha Gripper Plus® 22G x 25mm	12
*21-2761-24	Agulha Gripper Plus® 22G x 32mm	12
21-2769-24	Agulha Gripper Plus® 20G x 16mm	12
21-2767-24	Agulha Gripper Plus® 20G x 19mm	12
21-2762-24	Agulha Gripper Plus® 20G x 25mm	12
21-2763-24	Agulha Gripper Plus® 20G x 32mm	12
*21-2768-24	Agulha Gripper Plus® 19G x 19mm	12
*21-2764-24	Agulha Gripper Plus® 19G x 25mm	12
*21-2765-24	Agulha Gripper Plus® 19G x 32mm	12

* Itens sob consulta.

Responsável Técnico: Fernanda Thomann de A. Riberti - CRF/SP 48.750

Registro na ANVISA: 80228990135, 80228999015

Por favor, leia as informações fornecidas com o produto para obter instruções, avisos e advertências detalhados sobre o uso seguro do produto.

icumedical
human connections

Gripper Plus®

Procedimento



Para garantir um manuseio fácil e preciso, segure a Gripper Plus® /Gripper Plus® Power P.A.C® pelo Clip Plástico, pois ele mantém a alavanca do sistema de segurança presa ao corpo do dispositivo. Introduza a agulha na membrana do cateter totalmente implantado, obedecendo um ângulo de 90°;



Após a punção, retire o Clip Plástico, pressionando a sua parte superior, para liberar a trava;



Para remover a agulha, estabilize a sua base segurando-a com dois dedos da mão esquerda e posicione o dedo indicador da mão direita na alavanca do sistema de segurança;



Levante a alavanca até ouvir um “click”, a agulha estará travada não oferecendo risco;



Remova a Gripper Plus® / Gripper Plus® Power P.A.C. do paciente e descarte-a num recipiente apropriado.

Gripper Plus®

Um Novo Conceito em Agulhas de Huber.



Agulha com ponta tipo Huber

Permite puncionar a membrana do cateter totalmente implantado inúmeras vezes, sem danificá-la minimizando os danos e prolongando a sua vida útil;

CARACTERÍSTICAS:

• Base almofadada

Base especial fabricada em material hipo-alérgico que proporciona conforto e segurança ao paciente garantindo melhor estabilidade da agulha;

• Sistema de Segurança

Exclusivo sistema de segurança que permite a retirada da agulha com maior praticidade e sem risco de acidentes. Ao levantar a alavanca que controla a agulha, a ponta é automaticamente travada na base do dispositivo, tornando o procedimento rápido e prático;

• Clip Plástico de Segurança

O Clip plástico garante que durante a inserção a alavanca do sistema de segurança permaneça travada na base do dispositivo, permitindo o manuseio com uma só mão;

• Pinça de Controle de Fluxo

A pinça de controle permite interromper ou liberar o fluxo facilitando o controle de infusões durante o procedimento;

• Extensão para Infusão

A extensão é fabricada com tubo plástico (PVC), livre de látex, o qual proporciona conforto e segurança ao paciente, pois minimiza o risco de reações alérgicas;

• Conector Luer Lock Fêmea

Facilita as conexões proporcionando segurança.